

Parní inhalátor a obličejová sauna Purple

Model: BY1078

OPERACE S PŘÍSTROJEM

- Držte tělo přístroje v levé ruce, použijte pravou ruku k otočení nastavcem vydávajícího mlhu proti směru hodinových ručiček a jeho sundání.
- Naplňte vodou ocelovou nádobu / tělo přístroje zhruba do 4/5 jeho kapacity.
- Držte přístroj v levé ruce, použijte pravou pro našroubování nastavce na páru.
- Zvolte si obličejovou nebo nosní masku a nainstalujte ji na nastavce na páru.
- Připojte přístroj k elektrické síti.
- Stiskněte tlačítko pro zapnutí po připojení k síti.
- Přístroj můžete používat, jakmile se začne z masky vzlínat pára.
- Při používání obličejové masky můžete zvýšit množství vydávané páry posunutím tlačítka na nastavci doleva; při používání nosní masky můžete snížit množství vydávané páry posunutím tlačítka na nastavci doprava

UPOZORNĚNÍ

- Přístroj se musí používat na rovném a bezpečném místě, pro správnou funkci musí být přístroj správně smontován.
- Pokud má elektrická zástrčka slabý kontakt, hrozí její přehřívání. Ujistěte se, že je připojení v pořádku.
- Nepoužívejte přístroj při používání repelentů proti hmyzu nebo jiných chemických substancí v místnosti.
- Nepoužívejte přístroj v blízkosti vany, sprchy nebo jiných nádob s vodou.
- Pokud je přístroj spuštěn bez vody, indikační světlo tlačítka bude automaticky blikat. Přístroj disponuje pojistkou, lze ho restartovat po doplnění vody.
- Je doporučeno produkt pravidelně čistit, aby se zamezilo hromadění špíny a mastnoty.
- Je doporučeno použít čistou nebo destilovanou vodu, aby se zamezilo usazování.
- Po použití přístroje se zbytek vody se musí vylít a přístroj otřít jemným hadříkem.
- Množství vody v nádobě nesmí překročit rysku maxima a zároveň se nesmí přístroj zapínat bez vody.

SPECIFIKACE

- | | |
|--------------------------------------|---|
| • Napětí: AC 110V-240V / 50Hz / 60Hz | • Množství páry: 218ml / h |
| • Příkon: 130W | • Váha: 550 g |
| • Objem: 60ml | • Třída proti úrazu elektrickým proudem: Třída II |

POPIS PŘÍSTROJE

