

Masážní přístroj na oči

Přístroj na masáž očí využívá infračervené vytápění a technologii řízení mikroprocesorem, aby pomohl svalům očí provádět zdravý pohyb pomocí horkého obkladu/tlakového hnětení. Uvnitř výrobku je vzduchový polštář, který prostřednictvím rozumné kombinace mezi procesem plnění vzduchem a uvolňováním vzduchu vytváří hnětací masážní pohyb na svaly kolem očí. V kombinaci s vnitřním vibračním motorem a infračerveným vytápěním je vytvořen komplexní masážní efekt na okolní svaly.

Rozsah použití

Pro zmírnění vizuální únavy, prevenci krátkozrakosti, masážní účinek. Vysokoškolští studenti, středoškolští a základní školáci, osoby nadměrně namáhající oči, krátkozrací, dalekozrací nebo dlouhodobě nosící brýle, účetní, operátoři počítačů, designéři, sekretářky, učitelé, pracovníci, s dlouhodobou nespavostí očí, starší lidé mohou používat produkt s touto masážní funkcí.

Vlastnosti produktu

Tento produkt je high-tech masážní „křeslo“ na oči. Produkt využívá technologii řízení mikroprocesorem k provádění celého procesu. Tento produkt úspěšně aplikoval nový koncept vzduchového tlaku na péči o oči, což činí tento produkt více „lidským“. Vzduchový tlak je pod kontrolou počítače a může být na oči všesměrově polidštěný k hnětení tlaku, svaly kolem očí dostávají všesměrový masážní efekt.

Obsah balení

Masážní přístroj
Napájecí adaptér
USB kabel
Návod k použití



Před použitím

Zkontrolujte, zda má produkt dostatek energie. Pokud je baterie příliš nízká, stroj se vypne nebo jej nelze zapnout, použijte jej znovu po nabití. Ujistěte se, že vytáhnete napájecí adaptér, když je baterie plná, abyste se vyhnuli dlouhému nabíjení a prodloužili životnost produktu.

Nabíjení

Zasuňte USB konektor napájecího adaptéru do USB portu produktu.

Indikátor nabíjení je červený a po nabití je modrý.

Během nabíjení produkt nepodporuje spuštění (při nabíjení v pracovním stavu se produkt spustí do režimu ochrany a automaticky se zastaví).

Hlavní jednotka používá vestavěnou dobíjecí baterii, která poskytuje napájení na 4-5 hodin.

Použití

Výchozí pracovní doba je 15 minut. Pokud potřebujete prodloužit dobu použití, musíte znovu zapnout hlavní jednotku. Doporučuje se nepřekračovat 15 minut při každém použití.

Spuštění

Dlouhým stisknutím tlačítka pro zapnutí/vypnutí na 2 sekundy zapnete přístroj. Výchozí režim je automatický. Stisknutím tohoto tlačítka v zapnutém stavu přepnete režim masáže. Stisknutím tohoto tlačítka na 2 sekundy vypnete přístroj.

Přepínání režimů

Výchozí - Automatický režim	hnětení, vibrace, horký obklad, bluetooth
1. stisk Režim pohody	hnětení, horký obklad, bluetooth
2. stisk Režim vzdušeného tlaku	hnětení, bluetooth
3. stisk Režim vibrací	vibrace, bluetooth
4. stisk Režim horkého obkladu	horký obklad, bluetooth

Dalším stiskem volíte režimy odznova

Opatření pro použití

Pro správné použití produktu si pečlivě přečtěte tyto poznámky:

Nepoužívejte masážní přístroj na oči během chůze venku nebo řízení.

Nepoužívejte masážní přístroj na oči při vysoké teplotě a vlhkosti.

Nepoužívejte masážní přístroj na oči, pokud máte oční onemocnění, podstoupili jste oční operaci, máte glaukom, kataraktu, odchlípení sítnice a další závažná oční onemocnění.

Pacienti s hlubokou mrtvicí, vysokým krevním tlakem a hypotenzí by měli používat s opatrností. V případě jakéhokoli nepohodlí se poraďte s odborným lékařem a postupujte podle jeho pokynů.

Mentálně postižení nebo duševně postižení by měli používat opatrně. Používejte je pod dohledem doprovodu. Pokud se během procesu objeví jakékoli nepohodlí, okamžitě přestaňte.

Vyhnete se používání masážního přístroje na oči při pití alkoholu nebo když není vaše tělo v pořádku.

Tento masážní přístroj má funkci horkého obkladu, věnujte pozornost osobám, které jsou necitlivé na teplotu.

Před spuštěním umístěte masážní přístroj na oblast očí, aby nedošlo k poškození vzduchového polštáře nadměrným tlakem.

Před použitím odstraňte kontaktní čočky, sponky do vlasů a ozdoby do vlasů.

Tento masážní přístroj je osobní hygienický produkt, který nemůže nahradit léky a lékařské vybavení.

Pokud pocítíte bolest nebo vážné nepohodlí, okamžitě přestaňte používat a poraďte se s lékařem.

Tento masážní přístroj je navržen jako domácí elektronický zdravotní produkt, který není určen pro diagnostiku, léčbu a jiné komerční použití.

Pokud potřebujete čistit, okamžitě použijte bavlnu namočenou v lékařském alkoholu k otření a produkt by neměl být myt vodou. Nepokládejte jej do kapaliny.

Je zakázáno produkt rozebírat.

Používejte napájecí adaptér dodávaný touto společností a věnujte pozornost bezpečnosti elektrického proudu.

Zavřete oči a použijte tento produkt. Po použití bude váš zrak rozmazaný a po 1-3 minutách bude opět jasný.

Řešení problémů s přístrojem

Pokud produkt nefunguje správně, zkontrolujte následující body. Pokud produkt stále nefunguje, vypněte napájení a kontaktujte servisní středisko pro údržbu. Nezkoušejte produkt rozebírat nebo opravovat!

Typ poruchy	Možné příčiny selhání	Řešení
nelze spustit	nízký stav nabití baterie	nabijte baterii
	automatická ochrana napájení	připojte napájecí adaptér nechte přístroj v klidovém stavu po dobu 5 sekund
	baterie se nenabíjí	poškození napájecího adaptéru
tlak je příliš slabý	nízký stav nabití baterie	nabijte baterii

Údržba

Pokud je přístroj špinavý, otřete jej suchým měkkým hadříkem. Pokud je tělo obzvláště špinavé, namočte měkký hadřík v lékařském alkoholu k otření. Po použití položte přístroj na bezpečné místo. Nepokládejte těžké předměty na přístroj. Dbejte opatření proti vlhkosti, proti hlodavcům a proti znečištění. Při poruše požádejte o opravu odborný technický personál, nerozebírejte zařízení.

Přeprava a skladování a specifikace

Teplota prostředí: -40°C až 40°C. Relativní vlhkost: ne více než 80%, bez korozivních plynů a v dobře větrané místnosti.

Atmosférický tlak: 860hPa-1060hPa. Přeprava: tento produkt je vybaven jednoduchými zařízeními proti otřesům, vhodný pro leteckou, železniční, silniční a lodní přepravu. Měl by se vyhnout dešti, stříkající vodě, převrácení a kolizím. Pokud doba skladování přesáhne 6 měsíců, měla by být krabice otevřena k inspekci přístroje a jeho vyzkoušení a dobití.

Specifikace produktu

Název produktu: Masážní přístroj na oči

Model: 001

Jmenovité napětí: DC 5V

Jmenovitý výkon: 4,5W

Napájecí adaptér: AC 100-240V DC 5V

Bezpečný proud: ≤ 500mA

Bezpečnostní design