

Elektrická vyhřívací dečka na krk a ramena

Důležité bezpečnostní pokyny, návod uchovejte

Při používání tohoto elektrického přístroje dbejte těchto základních bezpečnostních pokynů!

- Na přístroj si nesedějte.
- Nepoužívejte při spaní.
- Nezatěžujte dečku vlastním tělem.
- Nepřekládejte dečku.
- Nevystavujte přístroj ostrým předmětům, které mohou přístroj poškodit.

Elektrické specifikace:

Napětí: 220-240V / 50-60 Hz Příkon: 70W Proud: 0,7A

Přístroj disponuje automatickou bezpečnostní pojistkou vypnutí po 2 hodinách.

Výběr teplot:

Výběr úrovně	Označení	Teplota
Nízká	1	30-40°C
Střední	2	40-50°C
Vysoká	3	50-60°C

⚠ Nebezpečí - pro snížení rizika popálení, elektrického šoku a požáru používejte přístroj v souladu s následujícími instrukcemi.

1. Přečtěte si všechny instrukce k použití produktu.
2. Nepoužívejte během spaní.
3. Nikdy nenechávejte přístroj bez dozoru, obzvláště v přítomnosti dětí.
4. Nepoužívejte přístroj na kojencích.
5. Nepoužívejte přístroj na zvířatech.
6. Přístroj není vhodný pro osoby s omezeným krevním oběhem nebo osoby v bezvědomí.
7. Přístroj nesmí používat osoby s diabetes.
8. Nepoužívejte v oblastech necitlivé pokožky, hrozí popálení.
9. Popálení může nastat nezávisle na nastavení teploty, kontrolujte pravidelně pokožku.
10. Nepoužívejte špendlíky nebo jiné kovové předměty pro zajištění přístroje na místě.
11. Nesedějte a netlačte na dečku. Položte deku na tělo, ne pod sebe. Teplo se může ve stísněném prostoru kumulovat. Vyhněte se ostrému ohýbání deky.
12. Nepoužívejte masti a balzámy (obzvláště ty hřejivé) na pokožku při používání přístroje. Hrozí popálení.
13. Nečistěte metodou suchého čištění.
14. Netahejte přístroj za napájecí kabel.
15. Neodpojujte přístroj z elektrické zásuvky vlhkýma rukama.
16. Při používání prodlužovací zástrčky použijte takovou, která odpovídá stejnému elektrickému standardu viz odstavec „elektrické specifikace“. Při nepoužívání přístroje ho odpojte ze zásuvky.
17. Vždy před použitím zkontrolujte vnitřní vinylovou podložku. Přestaňte přístroj používat, pokud bude vykazovat poškození nebo zhoršený stav.
18. Neohýbejte a neštipujte napájecí kabel. Přístroj nepoužívejte pokud má jakkoli poškozený napájecí kabel nebo se přístroj chová nestandardně. Přístroj neopravujte svépomocí. Pokud přístroj nepracuje správně, postupujte podle reklamačního formuláře.
19. Na přístroj nešlapejte.
20. Při skladování svažte kabel volně, napnutý kabel se může poškodit společně s vnitřními součástkami přístroje.
21. Produkt je vhodný pro domácí použití. Nepoužívejte přístroj venku.
22. Uchovejte tento návod.

POZOR: Nepoužívejte přístroj, pokud je ovladač nebo dečka mokrá. Před dalším použitím se ujistěte, že je přístroj plně vysušený. Při nepoužívání přístroj vypněte a odpojte ze zásuvky.

Údržba a péče

1. Přístroj odpojte ze zásuvky.
2. Odpojte dečku od ovladače.
3. Látková pokrývka lze sundat a vyčistit, vyhřívací těleso neumývejte.
4. Před dalším použitím se ujistěte, že je přístroj suchý.
5. Pro skladování volně srolujte dečku a volně otočte kabel po koncích deky. Uchovejte na chladném suchém místě.