

(CZ) NÁVOD K OBSLUZE - PROVOZNÍ A BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Nahřívací návlek na koleno

SYMBOL: 27300 EAN/GTIN: 5907451364703

CZ

Vážený pane/paní, děkujeme, že jste si zakoupili náš výrobek!

Před použitím produktu si přečtěte níže uvedené pokyny pro správné použití produktu.

Uschovejte si prosím tento návod pro budoucí použití a dodržujte jeho doporučení, protože nedodržení může představovat ohrožení života nebo zdraví.

APLIKACE A POPIS ZAŘÍZENÍ

Kolenní návlek s vyhřívací funkcí je inovativní zařízení určené k úlevě od bolesti a podpoře regenerace kolenního kloubu. Díky využití technologie tepla účinně uvolňuje svaly, snižuje ztuhlost a podporuje léčbu úrazů a onemocnění kloubů.

Výrobek je určen pouze pro domácí použití a není určeno pro lékařské nebo komerční použití a nemůže nahradit lékařskou terapii. Výrobek je určen pro použití v suchých místnostech. Není určen pro lékařské, terapeutické nebo komerční použití.

Z důvodu bezpečnosti a certifikace CE nesmí být výrobek žádným způsobem přestavován nebo upravován. Pokud produkt používáte k jiným účelům, než jsou výše popsány, může dojít k poškození produktu. Kromě toho může nesprávné použití způsobit nebezpečí, jako je zkrat, požár, úraz elektrickým proudem atd.

VAROVÁNÍ

- ☐ Nebezpečí nesprávného použití!
- ☐ Používání výrobku k jiným účelům, než ke kterému je určený nebo používání výrobku jakýmkoli jiným způsobem, může zahrnovat různá rizika.
- ☐ Výrobek smí být používán pouze k určenému účelu.
- ☐ Je třeba dodržovat postupy popsány v tomto návodu.

Poznámka Před použitím návleku se doporučuje poradit se s lékařem, zvláště pokud máte onemocnění kolen, záněty, poranění kloubů nebo kožní problémy v oblasti kolen.

POKYNY PRO UVEDENÍ DO PROVOZU/INSTALACI

- ☐ Položte návlek na rovný povrch a ujistěte se, že je zapojený, pokud výrobek vyžaduje kabelové připojení nebo nabíjení.
- ☐ Ujistěte se, že je povrch návleku čistý a suchý, než jej položíte na koleno.
- ☐ Umístěte návlek na koleno a ujistěte se, že střed zařízení je přímo nad kolenním kloubem.
- ☐ Zajistěte návlek upevněním pásků na suchý zip tak, aby těsně přiléhal ke kolenu, ale nezpůsoboval nepohodlí ani tlak. Návlek by měl pohodlně sedět, aby byla zajištěna optimální účinnost.
- ☐ Vyhledejte tlačítko Napájení na ovládacím panelu a podržte jej po dobu 2-3 sekund, aby se návlek zapnul.
- ☐ Funkci ohřevu pak můžete zapnout opětovným stisknutím tlačítka.
- ☐ Návlek se doporučuje používat maximálně 15-20 minut na jedno sezení, pokud pokyny výrobce neuvádějí jinak.
- ☐ Nepoužívejte funkci ohřevu příliš dlouho, aby nedošlo k přehřátí pokožky.
- ☐ Po dokončení nahřívání vypněte výrobek stisknutím tlačítka Napájení na ovládacím panelu.
- ☐ Před sejmutím z kolena počkejte několik minut, než návlek vychladne.

TIP

- ☐ Výrobek musí být zkontrolován z hlediska úplnosti dodávky a viditelných poškození.
- ☐ V případě nekompletní dodávky nebo pokud zjistíte poškození v důsledku špatného balení nebo přepravy, kontaktujte prosím servisní linku.

TECHNICKÉ ÚDAJE

- ☐ Materiál produktu: 100% polyester
- ☐ Zapínání na suchý zip
- ☐ Jedna velikost padne všem
- ☐ 3 stupně ohřevu
- ☐ Má kapsu na chladicí vložku
- ☐ Napájení: USB DC 5V

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

- Tento výrobek mohou používat děti ve věku 8 let a starší a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností nebo znalostí, pokud jsou pod dozorem nebo byly poučeny o bezpečném používání výrobku a rozumí rizikům z toho vyplývajícím.
- Nikdy neponořujte přístroj do vody.
- K čištění použijte vlhký hadřík nebo jemný čisticí prostředek.
- Nepoužívejte poškozený výrobek.
- Výrobek není určen pro použití dětmi.



- Děti si se spotřebičem nesmí hrát.
- Čištění a uživatelskou údržbu nesmějí provádět děti bez dozoru.
- Výrobek samotný a jeho příslušenství nejsou hračky, uchovávejte je prosím mimo dosah dětí, abyste předešli nebezpečí.
- Ujistěte se, že obalové materiály nezůstaly bez dozoru. Děti si s nimi mohou začít hrát, což je nebezpečné.
- Chraňte výrobek před extrémními teplotami, přímým slunečním zářením, silnými vibracemi, vysokou vlhkostí, vlhkostí, hořlavými plyny, výpary a rozpouštědly.
- Nevystavujte výrobek mechanickému namáhání.
- Pokud bezpečný provoz již není možný, přestaňte jej používat a zajistěte výrobek proti opětovnému použití. Bezpečný provoz již není možný, pokud výrobek: - byl poškozen, - nefunguje správně, - byl delší dobu skladován za nepříznivých podmínek nebo - byl během přepravy nadměrně zatížen.
- Je zakázáno používat výrobek, pokud je jakákoliv část poškozena. Pokud je kabel poškozen, je zakázáno provádět opravy sami.
- Nepoužívejte, pokud je napájecí kabel nebo napájecí adaptér poškozen nebo pokud není správně zapojen do zásuvky.
- Nerozebírejte výrobek sami.
- Nedotýkejte se tohoto produktu ani jej neupustěte. Přestaňte jej používat, pokud je poškozen nebo vystaven pádu nebo jinému mechanickému poškození.
- Výrobek skladujte na chladném a suchém místě.
- Před použitím výrobku se ujistěte, že síťové napětí odpovídá požadovanému provoznímu napětí zařízení.
- Vždy používejte výrobek tak, jak je určeno.

VAROVÁNÍ! NEBEZPEČÍ ZRANĚNÍ!

- ☐ Tento výrobek nesmí používat kojenci, malé děti, bezmocné osoby nebo zvířata.
- ☐ Okamžitě přerušte nahřívání a nepoužívejte, pokud je vám to nepříjemné a zaznamenáte bolest v nahřívané oblasti.
- ☐ Výrobek má během provozu horký povrch. Lidé, kteří nejsou citliví na teplo, musí být při používání výrobku opatrní.
- ☐ Nepoužívejte na oteklé, popálené, podrážděné, nemocné nebo poraněné oblasti pokožky nebo těla.
- ☐ Máte-li jakékoli pochybnosti o použití, poradte se se svým lékařem.
- ☐ Výrobek se nesmí používat na obličej (např. oči), hrtan, chodidla nebo jiné citlivé části těla.
- ☐ Během používání výrobek nezakrývejte (polštář, přikrývka atd.). Nepoužívejte výrobek v blízkosti benzínu nebo jiných hořlavých materiálů.

VAROVÁNÍ – HMOTNÉ POŠKOZENÍ!

- ☐ Výrobek používejte pouze uvnitř.
- ☐ Používejte výrobek pouze s dodaným síťovým adaptérem.



TIPY A INFORMACE TÝKAJÍCÍ SE NAKLÁDÁNÍ S POUŽITÝMI OBALY

Obal je vyroben z ekologických materiálů, které lze zlikvidovat v místním recyklačním středisku.

Použitý obalový materiál odevzdejte na místo určené místními úřady na likvidaci odpadu. Informace o možnostech likvidace použitého výrobku poskytuje obecní nebo městský úřad.



LIKVIDACE POUŽITÉHO ELEKTRICKÉHO A ELEKTRONICKÉHO ZAŘÍZENÍ

Z důvodů ochrany životního prostředí nesmí být použité elektrické a elektronické výrobky likvidovány s běžným komunálním odpadem v domovním odpadu, ale musí být zlikvidovány správným způsobem. Informace o odběrných místech a jejich otevírací době poskytuje příslušný úřad.



Tento výrobek splňuje požadavky příslušných evropských a národních směrnic, které se na něj vztahují. Výrobek splňuje evropské a národní požadavky na bezpečnost zařízení a výrobků.



Tento produkt splňuje požadavky příslušných evropských a národních směrnic, které se na něj vztahují, RoHS.



Varování před úrazem elektrickým proudem! Životu nebezpečné!

Vyhrazujeme si právo na změny textu, designu a technických údajů produktu bez předchozího upozornění.

Dovozce

VERK GROUP SIKORSKI SP.K.
WYGODY 16
05-090 PODOLSZYN NOWY
POLAND
info@verkgroup.pl
+48 888055550 / +48 22 670 90 10
internetowa-hurtownia.pl
verk.store
verk.pl